



HC900: de slimme zorgunit op maat

Bewoners zoveel mogelijk het leven laten leiden zoals ze gewend zijn. En zorgmedewerkers ondersteuning bieden om hun werk efficiënt en met plezier te laten doen. Zorgtechnologie draagt daar aan bij. Zorgtechnologie moet voor u werken een aansluiten bij de zorgvisie. De zorgtechnologie vervangt daarbij niet de medewerkers in de zorg.

Avics heeft de HC900 kamergateway, de slimme zorgunit, ontwikkeld. Het draagt bij aan welzijn van bewoners en werkplezier van zorgprofessionals.

In deze whitepaper leest u alles over HC900 kamergateway, de slimme zorgunit. Wat is het, hoe werkt het en hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van zorgtechnologie?

Inhoudsopgave whitepaper HC900 kamergateway:

1. Wat is de HC900 kamergateway?
2. Hoe werkt de HC900 kamergateway?
3. De mogelijkheden van de kamergateway
4. Hoe sluit de HC900 aan bij uw zorgvisie?

1. Wat is de HC900 kamergateway?

De HC900 is een slimme zorgunit die in het woon- of slaapvertrek aan het plafond of aan de muur wordt bevestigd. De HC900 is in drie varianten verkrijgbaar, de HC900, de HC925 en de HC950. De typen zorgunits lopen op in functionaliteiten waarbij de HC950 de meest uitgebreide unit is.

Standaard is de HC900 voorzien van een draadloze ontvanger, waarop draadloze periferie zoals halszenders en bewegingsmelders kunnen worden aangemeld. Tevens kan bij de HC925 en de HC950 gebruik gemaakt worden van de spreek- en luisterfunctie en heeft de HC950 fysieke knoppen voor het maken en afstellen van een alarm. Per cliënt wordt een profiel op maat samengesteld.

2. Hoe werkt de HC900 kamergateway?

Alarmsituatie

Als er een beweging of alarm wordt geregistreerd die in het zorgprofiel is aangemerkt als een mogelijke alarmsituatie, dan wordt dit doorgegeven aan de dienstdoende medewerker van de zorgorganisatie. De zorgmedewerker kan op zijn/haar smartphone de aard van de melding zien en hierop gericht actie ondernemen.

‘Het gevoel van veiligheid vergroten’

ZorgApp

De zorgmedewerker heeft op de smartphone een ZorgApp waarmee hij/zij de alarmmelding kan bekijken en afstellen. Middels dezelfde ZorgApp kan de zorgmedewerker een spreek- en luisterverbinding openen (vanaf de HC925), met de betreffende kamer en vragen wat er aan de hand is en of direct hulp gewenst is. →

3. De mogelijkheden van de HC900 kamergateway

De HC900 wordt per **bewoner** op maat ingesteld op basis van het individuele zorgleefplan. Functies kunnen op vaste tijden aan- en uitgezet worden, of automatisch aangezet worden wanneer de bewoner bijvoorbeeld naar bed gaat.

4. Hoe sluit de HC900 aan bij uw zorgvisie?

Bewoners moeten zo lang als mogelijk de regie over eigen leven behouden en het leven kunnen leiden zoals ze gewend zijn. Met respect voor privacy en individuele wensen en behoeften. Voor de zorgtechnologie en dus ook de HC900 betekent dit dat functies uitstaan, tenzij anders vermeld in het individuele zorgleefplan. Zorgmedewerkers zullen bewoners dan ook niet onnodig storen op de kamer tenzij er een dringende zorgvraag is.

De HC900 is flexibel en sluit aan bij de individuele wensen en behoeften. Daarnaast voldoet de HC900 aan alle eisen rond veiligheid en privacy, door te werken met beveiligde verbindingen en wachtwoordbeveiliging.

De functies per type zorgunit

	HC900	HC925	HC950
Draadloze ontvanger	✓	✓	✓
Spreek- / luister, akoestische bewaking	X	✓	✓
Oproep - / afstel knop	X	X	✓
Ingang / entree voor bedrade periferie	X	X	✓
Connectie via netwerk (PoE)	✓	✓	✓
Connectie via WiFi	OPTIE	OPTIE	OPTIE
Connectie via 4G (private) GSM	OPTIE	OPTIE	OPTIE



Meer informatie

Deze whitepaper zet kort uiteen wat de HC900 zorgunit is, hoe het in praktijk werkt en wat het voor een zorgorganisatie kan betekenen. Wilt u na het lezen van deze informatie meer weten? Bel ons (088) - 911 0 911 of stuur een e-mail naar info@avics.nl. Wij nemen graag contact met u op.



Volg Avics ook op Facebook, LinkedIn en Twitter.